

STAINBUSTER®



WHITE MAGIC

NYA BORR, AV KOMPOSITMATERIAL, FÖR POLERING

AV BELÄGGNINGAR OCH BORTTAGNING AV CEMENT ÖVERSKOTT
SKONSAM MOT EMALJ, KERAMIK OCH MJUKVÄVNAD

- STAINBUSTERS används i vinkelstycke med låg hastighet, ca 10 000 varv/minut. Under vattenspolning och med lätt tryck.
- STAINBUSTERS rengörs i ultraljudsbad och steriliseras i autoklav upp till 135 C.
- De är självformande och har en inbyggd abrassiv effekt.
- Behandlingen är smärtfri.

m.Åhgrens
Dental ab
+ web design



- Borttagning av missfärgningar och fläckar även i svåråtkomliga ställen utan risk för abrasionskada på tandsubstansen.
- Polering av tandytor efter ultraljudsdeponering.
- Borttagning av överskotts komposit i approximalrum utan att skada emaljen.
- Borttagning av överskottscement efter cementering av kronor och broar utan skador på mjukvävnad.
- Polering av temporärt cement på pelare utan att skada originalpreparation.
- Vid ortodontisk behandling, borttagning av kompositcement efter brakets genom att stora överskott tas bort med diamant eller poleringsborr och emalj nära områden finisheras med STAINBUSTER.
- Rotplaning efter djupdeponering.
- Eliminering av stressmoment vid cementering av kronor på implantat genom möjlighet att polera cementöverskott.

STANDARD

JUMBO

PARO



2501 2502 2503 2504



4001 4002



2505 2506



US PATENT 6,386,874 PATENT PENDING IN ALL OTHER COUNTRIES
CARBOTECH Sarl manufacturer 20, rue Biron 34190 Ganges France